



**Bolí vás  
záda nebo  
klouby?**

## TENS

léčba bolesti

zad, kloubů, svalové strnulosti a těžkých nohou  
TENS pulsy

- revitalizace léčené oblasti prostřednictvím stimulace nervových drah
- obnovení původních organických procesů
- cílená léčba příčin bolesti bez vedlejších účinků
- klinicky ověřený účinek
- registrovaný zdravotnický prostředek

### Co je TENS léčba bolesti

uvedené přístroje vytvářejí jemné elektrické impulsy, které jsou přenášeny do léčené oblasti měkkými polštářky (elektrodami) přiloženými na pokožku. Přestože OMRON TENS přístroje používají pokročilé technologie, jsou jednoduché k použití a poskytují široký rozsah léčebných procedur v automatickém nebo manuálním režimu.

ÚLEVA STISKNUTÍM  
TLAČÍTKA

# Jak správně použít OMRON TENS

- Vaše pokožka musí být čistá, suchá a zdravá
- Elektrody umístěte na každou stranu bolestivé oblasti, ale ne přímo na ni, nejméně 2,5 cm od sebe
- Vyberte program a zahajte léčbu, vždy od nižší intenzity k vyšší
- Celková doba procedury je 15–30 min až 3× denně
- Pravidelně vyhodnocujte léčebný účinek a sledujte zlepšení pro ukončení léčby



## OMRON PocketTens

- 5 inteligentních programů
- 3 léčebné zóny a 2 typy masáže
- nastavitelná intenzita stimulace
- jednoduché ovládání
- elektrody s dlouhou životností a vynikající biologickou snášenlivostí
- napájení 2 ks AAA baterie

## OMRON HeatTens

### Dvojitá léčba: Teplo + Tens

Teplo zahřívá a uvolňuje, Tens přináší úlevu od bolesti

- 3 režimy kombinací teplo – Tens
- 9 inteligentních přednastavených programů
- 6 léčebných zón a 3 typy masáže
- 2 nastavitelné úrovně tepla (vyhřívání elektrod)
- 20 nastavitelných úrovní Tens
- funkce REPEAT pro opakování oblíbených sekvencí
- gelové HeatTens elektrody s dlouhou životností
- napájení: akumulátor + síťový dobíjecí zdroj



## OMRON E3 Intense

- 9 inteligentních programů
- 6 léčebných zón a 3 typy masáže
- nastavitelná intenzita stimulace
- jednoduché ovládání třemi tlačítky
- názorný displej s průvodcem léčebnými zónami
- elektrody s dlouhou životností a vynikající biologickou snášenlivostí
- klip na opasek
- napájení 2 ks AAA baterie

Uvedené přístroje jsou zdravotnické prostředky – pečlivě prostudujte návod k použití. Nesmějí být používány u dětí, pacientů s kardiostimulátory a jinými implantáty, v případě horečky, epilepsie, srdečních chorob atd., další info na [www.celimed.cz](http://www.celimed.cz). V případě jakýchkoliv pochybností o vhodnosti léčby se poraďte se svým lékařem, fyzioterapeutem nebo lékárníkem.

V prodeji ve zdravotnických potřebách a lékárnách nebo na [www.celimed.cz](http://www.celimed.cz)

Obchodní zastoupení a autorizovaný servis pro ČR CELIMED s. r. o.  
Spotřebitelská linka: **475 211 113, [info@celimed.cz](mailto:info@celimed.cz)**